

До Державної служби України  
з лікарських засобів і контролю  
за наркотиками

від Представництва «Бакстер Сі Ай Ес  
Бі.Ві.» в Україні:  
Адреса: 02098, м. Київ, вул. Березняківська,  
29  
Тел.: +38 (044) 594-8050;  
Факс: +38 (044) 594-8051

**КОМУ:** УСІМ ЗАЦІКАВЛЕНИМ ОСОБАМ  
**ТЕМА:** Повідомлення від виробника

Вих. № QA-005 від 7 березня 2017 р.

У вересні 2013 року компанією Baxter International Inc. було укладено глобальну угоду з придбання бізнесу компанії Gambro. У результаті цієї угоди відбулося об'єднання двох світових лідерів на ринку діалізу – компаній Baxter і Gambro. Це дозволило забезпечити кращі умови та кращий сервіс для медичних центрів і пацієнтів за допомогою злиття інноваційних продуктів і підходів до терапії, яка існує в обох компаніях.

Із 2016 року компанія «Бакстер» є уповноваженим представником компанії Gambro на території України (надалі – «Виробник») і, дотримуючись підвищеної обережності, інформує Вас про те, що для апаратів для гемодіалізу ARTIS та INNOVA виробництва «Гамбро Даско С.п.А.», Італія, необхідно вжити попереджувальних заходів для запобігання ризику виникнення проблем у разі використання й для безпеки пацієнтів. Перелік програм модифікації та кількість апаратів ARTIS й INNOVA, що підлягають оновленню й модернізації, наведений у цій таблиці:

Номер програми модифікації	Найменування апарата	Найменування програми модифікації обладнання	Кількість задіяних апаратів в Україні, які підлягають модифікації*
FA_2015_001 (MM020)	Artis (Артис)	Заміна плати лічильника наробку	5
FA_2015_003 (MM021)	Artis (Артис)	Заміна детектора витоку рідини на нову модель	15
FA_2011_010 (MM008)	Innova (Іннова)	Заміна монтажного блока рН зонда	538

\*Детальний опис програм, порядок дій і перелік серійних номерів апаратів наведені в додатках 1-6.

Як запобіжний захід компанія «Бакстер» просить Вас проінформувати всіх потенційних користувачів цього обладнання в Україні про ці програми модифікації, що стосуються безпеки роботи апаратів моделей Artis та Innova виробництва «Гамбро Даско С.п.А.».

Звертаємо Вашу увагу, що всі програми модифікації вимагають залучення інженера сервісної служби для перевірки апарата й заміни відповідних запчастин згідно з вимогами програми модифікації. Доводимо до Вашого відома, що з 1 липня 2015 року такі компанії, як ТОВ «Діалсервіс», МСП «Гамбрамед» та інші сервісні організації на території України офіційно припинили технічне обслуговування й ремонт медичної техніки торгівельної марки «Гамбро» (Gambro).

Компанія «Бакстер» як авторизована виробником особа несе всю відповідальність за якість і безпеку обладнання, що постачається, запчастин, комплектуючих, а також здійснювані ремонтні роботи й роботи з технічного обслуговування в гарантійний і післягарантійний період і у зв'язку із цим повідомляє, що починаючи з 1 липня 2015 року новим єдиним на цей момент офіційним постачальником послуг із технічного обслуговування й ремонту апаратів торгівельної марки «Гамбро» на території України є ТОВ «Діавіта». Сервісні інженери ТОВ «Діавіта» пройшли офіційне навчання від компанії «Гамбро» в Європі, оснащені всім необхідним обладнанням і запчастинами для проведення сервісного обслуговування медичної техніки торгівельної марки «Гамбро».

ТОВ «Діавіта» є також офіційним постачальником запчастин, аксесуарів і приладдя, необхідного для ремонту й технічного обслуговування обладнання «Гамбро», зокрема апаратів Artis та Innova. Інші компанії, що проводять ремонт і технічне обслуговування обладнання «Гамбро», використовують неоригінальні, контрафактні та фальсифіковані запчастини або запчастини, завезені неофіційно, а також зняті з устаткування, яке було у використанні, що категорично заборонено виробником. Компанія «Бакстер» не може гарантувати якість роботи й безпеку пацієнтів, якщо під час технічного обслуговування використовуються такі запчастини, і настійно рекомендує з питань технічного обслуговування та придбання запчастин звертатися виключно до ТОВ «Діавіта». Компанія «Бакстер» гарантує якість роботи медичної техніки торгівельної марки Гамбро (Gambro) тільки в разі проведення сервісного обслуговування авторизованим сервісним інженером ТОВ «Діавіта» й використання оригінальних запчастин від виробника.

У разі виникнення питань щодо цього повідомлення й модифікації апаратів або щодо інших питань із технічного обслуговування цих апаратів необхідно звертатися за такими адресами:

Сервісний центр «Діавіта» в Україні:

Адреса: 02098, м. Київ, вул. Березняківська, 29  
Тел.: +38 (044) 490-5390; Факс: +38 (044) 490-5393  
E-mails: [mail@diavita.com.ua](mailto:mail@diavita.com.ua); [zef@diavita.com.ua](mailto:zef@diavita.com.ua)

Сервісний центр компанії «Бакстер» у Росії та країнах СНД:


Адреса: 125171, м. Москва, Ленінградське шосе, буд. 16А, будова 1  
Тел.: +7 (495) 647-68-07; Факс: +7 (495) 647-68-08  
E-mail: [ts\\_russia@baxter.com](mailto:ts_russia@baxter.com)

Представництво «Бакстер Сі Ай Ес Бі.Ві.» в Україні:

Адреса: 02098, м. Київ, вул. Березняківська, 29  
Тел.: +38 (044) 594-8050; Факс: +38 (044) 594-8051

Із повагою,

В. о. Голови представництва «Бакстер Сі Ай Ес Бі.Ві.» в Україні

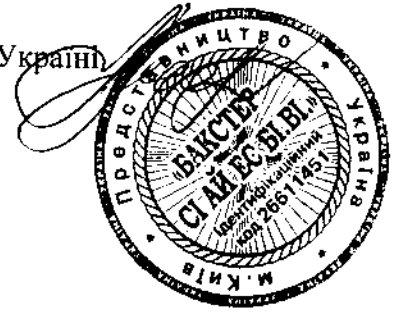

**ДОДАТКИ:**

1. Опис програми № 1 - FA\_2015\_001 (MM020)
2. Опис програми № 2 - FA\_2015\_003 (MM021)
3. Опис програми № 3 - FA\_2011\_010 (MM008)
4. Заявка на виконання робіт
5. Контакти сервісної служби
6. Перелік серійних номерів апаратів, що підлягають модернізації

## ДОДАТОК № 1 – Опис програми № 2 - FA\_2015\_001 (MM020)

Шановний клієнте!

**Інформація щодо безпеки залучених продуктів**

Апарат для гемодіалізу ARTIS із приладдям виробництва «Гамбро Даско С.п.А.», Італія

**Опис проблеми**

Компанія «Бакстер» постачає «Апарат для гемодіалізу ARTIS із приладдям» виробництва «Гамбро Даско С.п.А.», Італія. Від компанії «Гамбро Даско С.п.А.» було отримано повідомлення про необхідність заміни електронної плати вимірювача наробку в 6 апаратах, поставлених до України. Замість плат із версією розробки Rev. 05 були помилково встановлені плати з версією Rev. 04. Нова версія була розроблена, щоб продовжити програмований автозапуск апарата до 168 годин (7 днів). У версії Rev. 04 автозапуск обмежується 48 годинами, як це було в попередній конфігурації.

**Дії покупця/користувача**

Як запобіжний захід компанія «Бакстер» просить усіх користувачів «Апарата для гемодіалізу ARTIS» (за наявності обладнання й готовності провести програму з модифікації) звернутися до Сервісної служби ТОВ «Діавіта», заповнивши форму заявки, що наведена в Додатку № 4, і відправивши її до компанії факсом: +38 (044) 490-5393 або у відсканованому вигляді електронною поштою: [mail@diavita.com.ua](mailto:mail@diavita.com.ua).

Ці роботи з модифікації апарата будуть виконані сервісним інженером ТОВ «Діавіта» безкоштовно для лікувальних закладів і користувачів.

Компанія «Бакстер» просить надіслати до 1 травня 2017 року заявку на виконання цих робіт з оновлення обладнання, щоб уникнути отримання повторних повідомлень.

**Додаткова інформація та підтримка**

До 1 червня 2017 року ТОВ «Діавіта» підготує план виконання програм модифікації та проінформує всіх користувачів, які надіслали заявки, про дати візиту інженера й оновлення апаратів.

Дякуємо за вашу співпрацю. У разі виникнення питань щодо цього повідомлення й модифікації апаратів або щодо інших питань із технічного обслуговування цих апаратів чи постачання запчастин до них необхідно звертатися до ТОВ «Діавіта» за телефоном: +38 (044) 490-5390 з 09.00 до 18.00 з понеділка по п'ятницю або відправити звернення на електронну адресу: [mail@diavita.com.ua](mailto:mail@diavita.com.ua).

Із повагою,

В. о. Голови представництва «Бакстер Сі Ай Ес Бі.Ві.» в Україні



ДОДАТОК № 2 – Опис програми № 4 - FA\_2015\_003 (MM021)

Шановний клієнте!

**Інформація щодо безпеки залучених продуктів**

Апарат для гемодіалізу ARTIS із приладдям виробництва «Гамбро Даско С.п.А.», Італія

**Опис проблеми**

Компанія «Бакстер» постачає «Апарат для гемодіалізу ARTIS із приладдям» виробництва «Гамбро Даско С.п.А.», Італія. Від компанії «Гамбро Даско С.п.А.» було отримано повідомлення про необхідність встановлення модернізованого датчика витоку рідини на всіх апаратах, які перебувають в експлуатації у лікувальних закладах. Новий датчик відрізняється більшою надійністю й поліпшує якість роботи апарата. Якщо стара модель складалася з декількох деталей, то нова – це єдина ливарна форма, що унеможливує протікання рідини з блока ультрафільтрів у разі їхньої заміни.

**Дії покупця/користувача**

Як запобіжний захід компанія «Бакстер» просить усіх користувачів «Апарата для гемодіалізу ARTIS» (за наявності обладнання й готовності провести програму з модифікації) звернутися до Сервісної служби ТОВ «Діавіта», заповнивши форму заявки, що наведена в Додатку № 4, і відправивши її до компанії факсом: +38 (044) 490-5393 або у відсканованому вигляді електронною поштою: mail@diavita.com.ua.

Ці роботи з модифікації апарата будуть виконані сервісним інженером ТОВ «Діавіта» безкоштовно для лікувальних закладів і користувачів.

Компанія «Бакстер» просить надіслати до 1 травня 2017 року заявку на виконання цих робіт з оновлення обладнання, щоб уникнути отримання повторних повідомлень.

**Додаткова інформація та підтримка**

До 1 червня 2017 року ТОВ «Діавіта» підготує план виконання програм модифікації та проінформує всіх користувачів, які надіслали заявки, про дати візиту інженера й оновлення апаратів.

Дякуємо за вашу співпрацю. У разі виникнення питань щодо цього повідомлення й модифікації апаратів або щодо інших питань із технічного обслуговування цих апаратів чи постачання запчастин до них необхідно звертатися до ТОВ «Діавіта» за телефоном: +38 (044) 490-5390 з 09.00 до 18.00 з понеділка по п'ятницю або відправити звернення на електронну адресу: mail@diavita.com.ua.

Із повагою,

В. о. Голови представництва «Бакстер Сі Ай Ес Бі.Ві.» в Україні



ДОДАТОК № 3 – Опис програми № 3 - FA\_2011\_010 (MM08)

Шановний клієнте!

**Інформація щодо безпеки залучених продуктів**

Апарат Innova виробництва «Гамбро Даско С.п.А.», Італія.

**Опис проблеми**

Компанія «Бакстер» постачає апарат Innova виробництва «Гамбро Даско С.п.А.», Італія. Від компанії «Гамбро Даско С.п.А.» було отримано повідомлення про необхідність встановлення нового монтажного блока рН зонда, призначеного забезпечувати його правильне положення щодо датчика рН за допомогою нових отворів для кріплення, що завжди дозволить необхідній кількості рідини залишатися/проходити крізь зонд. У новому положенні зонд матиме стабільніші значення показників і стане надійнішим. Новий монтажний блок відрізняється від попереднього заміною прорізів на отвори (при цьому отвори піднято на 5 мм вище). Новий монтажний блок можна відрізнити від старої моделі завдяки жовтій етикетці вгорі.

**Дії покупця/користувача**

Як запобіжний захід компанія «Бакстер» просить усіх користувачів апарата Innova (за наявності обладнання й готовності провести програму з модифікації) звернутися до Сервісної служби ТОВ «Діавіта», заповнивши форму заявки, що наведена в Додатку № 4, і відправивши її до компанії факсом: +38 (044) 490-5393 або у відсканованому вигляді електронною поштою: mail@diavita.com.ua.

Ці роботи з модифікації апарата будуть виконані сервісним інженером ТОВ «Діавіта» безкоштовно для лікувальних закладів і користувачів.

Компанія «Бакстер» просить надіслати до 1 травня 2017 року заявку на виконання цих робіт з оновлення обладнання, щоб уникнути отримання повторних повідомлень.

**Додаткова інформація та підтримка**

До 1 червня 2017 року ТОВ «Діавіта» підготує план виконання програм модифікації та проінформує всіх користувачів, які надіслали заявки, про дати візиту інженера й оновлення апаратів.

Дякуємо за вашу співпрацю. У разі виникнення питань щодо цього повідомлення й модифікації апаратів або щодо інших питань із технічного обслуговування цих апаратів чи постачання запчастин до них необхідно звертатися до ТОВ «Діавіта» за телефоном: +38 (044) 490-5390 з 09.00 до 18.00 з понеділка по п'ятницю або відправити звернення на електронну адресу: mail@diavita.com.ua.

Із повагою,

В. о. Голови представництва «Бакстер Сі Ай Ес Бі.Ві.» в Україні



ДОДАТОК № 4 – Заявка на виконання робіт і контакти служби Технічного сервісу

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Назва закладу)  
(Адреса)

Від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ р.

Директору ТОВ «ДІАВІТА»

Адміністрація (Назва закладу)

звертається до вас із проханням провести технічні роботи щодо такого медичного обладнання:

1.

Назва апарата	Серійний номер (S/N)	Рік виробництва	Напрацьовано годин	Тип необхідних технічних робіт
Апарат експлуатується за адресою				
Опис несправності або зауваження щодо роботи				

2.

Назва апарата	Серійний номер (S/N)	Рік виробництва	Напрацьовано годин	Тип необхідних технічних робіт
Апарат експлуатується за адресою				
Опис несправності або зауваження щодо роботи				

Зобов'язуємося до прибуття спеціаліста відділу служби Технічної підтримки провести дезінфекційну обробку зазначеного медичного обладнання. Оплату за фактом проведених робіт гарантуємо.

**Від Замовника:**

(Посада)

(П. І. Б. Підпис, печатка)

Із повагою,

В. о. Голови представництва «Бакстер Сі Ай Ес Бі.Ві.» в Україні



## **ДОДАТОК № 5 – Контакти служби Технічного сервісу**

### **Сервісний центр «Діавіта» в Україні:**


Адреса: 02098, м. Київ, вул. Березняківська, 29  
Тел.: +38 (044) 490-5390; Факс: +38 (044) 490-5393  
E-mails: mail@diavita.com.ua; zef@diavita.com.ua

### **Сервісний центр компанії «Бакстер» у Росії та країнах СНД:**

Адреса: 125171, м. Москва, Ленінградське шосе, буд. 16А, будова І  
Тел.: +7 (495) 647-68-07; Факс: +7 (495) 647-68-08  
E-mail: ts\_russia@baxter.com

Із повагою,

В. о. Голови представництва «Бакстер Сі Ай Ес Бі.Ві.» в Україні

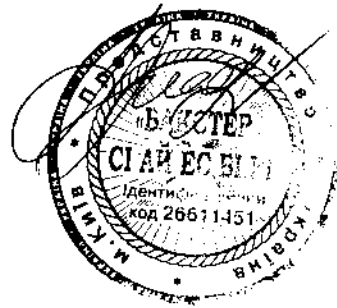



**ДОДАТОК № 6 – Перелік серійних номерів апаратів, що підлягають модернізації**

Апарати Innova (програма FA\_2011\_010 (MM008))

№	Серійний номер	Апарат	№	Серійний номер	Апарат	№	Серійний номер	Апарат
1	PH 18589	Innova	180	PH 22979	Innova	359	PH 26009	Innova
2	PH 18590	Innova	181	PH 22980	Innova	360	PH 26010	Innova
3	PH 18602	Innova	182	PH 22981	Innova	361	PH 26011	Innova
4	PH 18603	Innova	183	PH 22982	Innova	362	PH 26012	Innova
5	PH 18604	Innova	184	PH 22983	Innova	363	PH 26014	Innova
6	PH 18605	Innova	185	PH 22992	Innova	364	PH 26015	Innova
7	PH 18606	Innova	186	PH 22993	Innova	365	PH 26016	Innova
8	PH 18786	Innova	187	PH 22994	Innova	366	PH 26017	Innova
9	PH 18789	Innova	188	PH 22995	Innova	367	PH 26018	Innova
10	PH 18793	Innova	189	PH 22996	Innova	368	PH 26019	Innova
11	PH 18796	Innova	190	PH 22997	Innova	369	PH 26020	Innova
12	PH 18798	Innova	191	PH 22998	Innova	370	PH 26021	Innova
13	PH 18801	Innova	192	PH 22999	Innova	371	PH 26022	Innova
14	PH 18803	Innova	193	PH 23000	Innova	372	PH 26039	Innova
15	PH 18807	Innova	194	PH 23001	Innova	373	PH 26040	Innova
16	PH 18808	Innova	195	PH 23011	Innova	374	PH 26041	Innova
17	PH 18809	Innova	196	PH 23012	Innova	375	PH 26042	Innova
18	PH 18811	Innova	197	PH 23013	Innova	376	PH 26043	Innova
19	PH 18812	Innova	198	PH 23014	Innova	377	PH 26044	Innova
20	PH 18851	Innova	199	PH 23015	Innova	378	PH 26045	Innova
21	PH 18852	Innova	200	PH 23016	Innova	379	PH 26046	Innova
22	PH 18853	Innova	201	PH 23017	Innova	380	PH 26047	Innova
23	PH 18854	Innova	202	PH 23018	Innova	381	PH 26048	Innova
24	PH 18855	Innova	203	PH 23019	Innova	382	PH 26049	Innova
25	PH 18856	Innova	204	PH 23021	Innova	383	PH 26050	Innova
26	PH 18857	Innova	205	PH 23022	Innova	384	PH 26051	Innova
27	PH 18858	Innova	206	PH 23023	Innova	385	PH 26053	Innova
28	PH 18859	Innova	207	PH 23024	Innova	386	PH 26054	Innova
29	PH 18860	Innova	208	PH 23553	Innova	387	PH 26055	Innova
30	PH 18883	Innova	209	PH 23570	Innova	388	PH 26056	Innova
31	PH 18884	Innova	210	PH 23571	Innova	389	PH 26057	Innova
32	PH 18885	Innova	211	PH 23572	Innova	390	PH 26058	Innova
33	PH 18911	Innova	212	PH 23573	Innova	391	PH 26059	Innova
34	PH 18912	Innova	213	PH 23574	Innova	392	PH 26060	Innova
35	PH 18913	Innova	214	PH 23575	Innova	393	PH 26061	Innova
36	PH 18914	Innova	215	PH 23577	Innova	394	PH 26062	Innova
37	PH 18915	Innova	216	PH 23578	Innova	395	PH 26067	Innova
38	PH 18916	Innova	217	PH 23587	Innova	396	PH 26068	Innova
39	PH 18917	Innova	218	PH 23588	Innova	397	PH 26069	Innova
40	PH 18918	Innova	219	PH 23589	Innova	398	PH 26071	Innova
41	PH 18919	Innova	220	PH 23591	Innova	399	PH 26073	Innova
42	PH 18920	Innova	221	PH 23592	Innova	400	PH 26074	Innova
43	PH 18921	Innova	222	PH 23593	Innova	401	PH 26077	Innova
44	PH 18922	Innova	223	PH 23594	Innova	402	PH 26079	Innova
45	PH 18923	Innova	224	PH 23595	Innova	403	PH 26082	Innova

46	PH 18924	Innova	225	PH 23596	Innova	404	PH 26083	Innova
47	PH 18925	Innova	226	PH 23597	Innova	405	PH 26084	Innova
48	PH 18926	Innova	227	PH 23598	Innova	406	PH 26086	Innova
49	PH 18927	Innova	228	PH 23601	Innova	407	PH 26088	Innova
50	PH 18928	Innova	229	PH 23602	Innova	408	PH 26090	Innova
51	PH 18929	Innova	230	PH 23603	Innova	409	PH 26092	Innova
52	PH 18930	Innova	231	PH 23604	Innova	410	PH 26093	Innova
53	PH 18931	Innova	232	PH 23605	Innova	411	PH 26095	Innova
54	PH 18932	Innova	233	PH 23606	Innova	412	PH 26096	Innova
55	PH 19171	Innova	234	PH 23607	Innova	413	PH 26098	Innova
56	PH 19173	Innova	235	PH 23608	Innova	414	PH 26101	Innova
57	PH 19224	Innova	236	PH 23609	Innova	415	PH 26104	Innova
58	PH 19225	Innova	237	PH 23629	Innova	416	PH 26105	Innova
59	PH 19226	Innova	238	PH 23630	Innova	417	PH 26106	Innova
60	PH 19227	Innova	239	PH 23631	Innova	418	PH 26107	Innova
61	PH 19228	Innova	240	PH 23632	Innova	419	PH 26108	Innova
62	PH 19277	Innova	241	PH 23633	Innova	420	PH 26110	Innova
63	PH 19278	Innova	242	PH 23634	Innova	421	PH 26112	Innova
64	PH 19280	Innova	243	PH 23635	Innova	422	PH 26130	Innova
65	PH 19281	Innova	244	PH 23636	Innova	423	PH 26133	Innova
66	PH 19282	Innova	245	PH 23637	Innova	424	PH 26136	Innova
67	PH 19283	Innova	246	PH 23638	Innova	425	PH 26177	Innova
68	PH 19284	Innova	247	PH 23639	Innova	426	PH 26178	Innova
69	PH 19442	Innova	248	PH 23640	Innova	427	PH 26189	Innova
70	PH 19455	Innova	249	PH 23641	Innova	428	PH 26191	Innova
71	PH 19456	Innova	250	PH 23642	Innova	429	PH 26194	Innova
72	PH 19459	Innova	251	PH 25198	Innova	430	PH 26195	Innova
73	PH 19519	Innova	252	PH 25199	Innova	431	PH 26256	Innova
74	PH 19572	Innova	253	PH 25201	Innova	432	PH 26257	Innova
75	PH 19574	Innova	254	PH 25206	Innova	433	PH 26261	Innova
76	PH 19578	Innova	255	PH 25208	Innova	434	PH 26262	Innova
77	PH 19637	Innova	256	PH 25213	Innova	435	PH 26263	Innova
78	PH 19638	Innova	257	PH 25216	Innova	436	PH 26265	Innova
79	PH 19641	Innova	258	PH 25218	Innova	437	PH 26266	Innova
80	PH 19646	Innova	259	PH 25222	Innova	438	PH 26267	Innova
81	PH 19676	Innova	260	PH 25240	Innova	439	PH 26268	Innova
82	PH 21233	Innova	261	PH 25248	Innova	440	PH 26269	Innova
83	PH 21240	Innova	262	PH 25250	Innova	441	PH 26270	Innova
84	PH 21241	Innova	263	PH 25252	Innova	442	PH 26389	Innova
85	PH 21242	Innova	264	PH 25253	Innova	443	PH 26392	Innova
86	PH 21255	Innova	265	PH 25254	Innova	444	PH 26402	Innova
87	PH 21515	Innova	266	PH 25293	Innova	445	PH 26417	Innova
88	PH 21516	Innova	267	PH 25296	Innova	446	PH 26662	Innova
89	PH 21517	Innova	268	PH 25307	Innova	447	PH 26668	Innova
90	PH 21518	Innova	269	PH 25308	Innova	448	PH 26671	Innova
91	PH 21519	Innova	270	PH 25309	Innova	449	PH 26791	Innova
92	PH 21520	Innova	271	PH 25310	Innova	450	PH 26792	Innova
93	PH 21521	Innova	272	PH 25313	Innova	451	PH 26793	Innova
94	PH 21522	Innova	273	PH 25314	Innova	452	PH 26794	Innova
95	PH 21523	Innova	274	PH 25315	Innova	453	PH 26795	Innova
96	PH 21524	Innova	275	PH 25316	Innova	454	PH 26796	Innova
97	PH 21525	Innova	276	PH 25328	Innova	455	PH 26797	Innova
98	PH 21526	Innova	277	PH 25329	Innova	456	PH 26798	Innova

99	PH 21527	Innova	278	PH 25330	Innova	457	PH 26799	Innova
100	PH 21603	Innova	279	PH 25663	Innova	458	PH 26800	Innova
101	PH 21606	Innova	280	PH 25666	Innova	459	PH 26801	Innova
102	PH 21792	Innova	281	PH 25668	Innova	460	PH 26802	Innova
103	PH 22504	Innova	282	PH 25670	Innova	461	PH 26803	Innova
104	PH 22516	Innova	283	PH 25678	Innova	462	PH 26804	Innova
105	PH 22518	Innova	284	PH 25679	Innova	463	PH 26806	Innova
106	PH 22520	Innova	285	PH 25844	Innova	464	PH 26807	Innova
107	PH 22608	Innova	286	PH 25846	Innova	465	PH 26808	Innova
108	PH 22609	Innova	287	PH 25854	Innova	466	PH 26809	Innova
109	PH 22610	Innova	288	PH 25872	Innova	467	PH 26810	Innova
110	PH 22611	Innova	289	PH 25876	Innova	468	PH 26811	Innova
111	PH 22612	Innova	290	PH 25886	Innova	469	PH 26812	Innova
112	PH 22613	Innova	291	PH 25887	Innova	470	PH 26813	Innova
113	PH 22614	Innova	292	PH 25888	Innova	471	PH 26814	Innova
114	PH 22615	Innova	293	PH 25891	Innova	472	PH 26815	Innova
115	PH 22616	Innova	294	PH 25923	Innova	473	PH 26816	Innova
116	PH 22617	Innova	295	PH 25931	Innova	474	PH 26817	Innova
117	PH 22618	Innova	296	PH 25935	Innova	475	PH 26818	Innova
118	PH 22619	Innova	297	PH 25936	Innova	476	PH 26819	Innova
119	PH 22620	Innova	298	PH 25939	Innova	477	PH 26820	Innova
120	PH 22621	Innova	299	PH 25941	Innova	478	PH 26821	Innova
121	PH 22622	Innova	300	PH 25944	Innova	479	PH 28022	Innova
122	PH 22623	Innova	301	PH 25945	Innova	480	PH 28023	Innova
123	PH 22624	Innova	302	PH 25946	Innova	481	PH 28025	Innova
124	PH 22626	Innova	303	PH 25947	Innova	482	PH 28026	Innova
125	PH 22627	Innova	304	PH 25948	Innova	483	PH 28027	Innova
126	PH 22628	Innova	305	PH 25949	Innova	484	PH 28029	Innova
127	PH 22629	Innova	306	PH 25950	Innova	485	PH 28030	Innova
128	PH 22630	Innova	307	PH 25951	Innova	486	PH 28031	Innova
129	PH 22631	Innova	308	PH 25952	Innova	487	PH 28032	Innova
130	PH 22632	Innova	309	PH 25953	Innova	488	PH 28120	Innova
131	PH 22633	Innova	310	PH 25954	Innova	489	PH 28123	Innova
132	PH 22667	Innova	311	PH 25955	Innova	490	PH 28134	Innova
133	PH 22668	Innova	312	PH 25956	Innova	491	PH 28135	Innova
134	PH 22669	Innova	313	PH 25957	Innova	492	PH 28138	Innova
135	PH 22670	Innova	314	PH 25958	Innova	493	PH 28149	Innova
136	PH 22671	Innova	315	PH 25959	Innova	494	PH 28150	Innova
137	PH 22672	Innova	316	PH 25960	Innova	495	PH 28152	Innova
138	PH 22673	Innova	317	PH 25961	Innova	496	PH 28153	Innova
139	PH 22683	Innova	318	PH 25962	Innova	497	PH 28154	Innova
140	PH 22684	Innova	319	PH 25963	Innova	498	PH 28166	Innova
141	PH 22685	Innova	320	PH 25964	Innova	499	PH 28167	Innova
142	PH 22686	Innova	321	PH 25965	Innova	500	PH 28182	Innova
143	PH 22687	Innova	322	PH 25966	Innova	501	PH 28183	Innova
144	PH 22688	Innova	323	PH 25967	Innova	502	PH 28193	Innova
145	PH 22689	Innova	324	PH 25968	Innova	503	PH 28194	Innova
146	PH 22690	Innova	325	PH 25969	Innova	504	PH 28216	Innova
147	PH 22691	Innova	326	PH 25970	Innova	505	PH 29653	Innova
148	PH 22692	Innova	327	PH 25972	Innova	506	PH 29658	Innova
149	PH 22693	Innova	328	PH 25974	Innova	507	PH 29693	Innova
150	PH 22694	Innova	329	PH 25975	Innova	508	PH 29697	Innova
151	PH 22743	Innova	330	PH 25977	Innova	509	PH 29699	Innova

152	PH 22744	Innova	331	PH 25978	Innova	510	PH 29701	Innova
153	PH 22745	Innova	332	PH 25979	Innova	511	PH 29879	Innova
154	PH 22746	Innova	333	PH 25980	Innova	512	PH 29880	Innova
155	PH 22747	Innova	334	PH 25981	Innova	513	PH 30077	Innova
156	PH 22748	Innova	335	PH 25982	Innova	514	PH 30098	Innova
157	PH 22756	Innova	336	PH 25983	Innova	515	PH 30100	Innova
158	PH 22757	Innova	337	PH 25984	Innova	516	PH 30104	Innova
159	PH 22760	Innova	338	PH 25985	Innova	517	PH 30107	Innova
160	PH 22761	Innova	339	PH 25986	Innova	518	PH 30109	Innova
161	PH 22824	Innova	340	PH 25987	Innova	519	PH 30873	Innova
162	PH 22827	Innova	341	PH 25988	Innova	520	PH 30874	Innova
163	PH 22841	Innova	342	PH 25989	Innova	521	PH 30875	Innova
164	PH 22842	Innova	343	PH 25993	Innova	522	PH 30876	Innova
165	PH 22843	Innova	344	PH 25994	Innova	523	PH 30877	Innova
166	PH 22844	Innova	345	PH 25995	Innova	524	PH 30878	Innova
167	PH 22846	Innova	346	PH 25996	Innova	525	PH 30879	Innova
168	PH 22847	Innova	347	PH 25997	Innova	526	PH 30880	Innova
169	PH 22849	Innova	348	PH 25998	Innova	527	PH 30881	Innova
170	PH 22858	Innova	349	PH 25999	Innova	528	PH 30898	Innova
171	PH 22861	Innova	350	PH 26000	Innova	529	PH 30899	Innova
172	PH 22864	Innova	351	PH 26001	Innova	530	PH 30900	Innova
173	PH 22866	Innova	352	PH 26002	Innova	531	PH 30901	Innova
174	PH 22869	Innova	353	PH 26003	Innova	532	PH 30903	Innova
175	PH 22887	Innova	354	PH 26004	Innova	533	PH 30904	Innova
176	PH 22888	Innova	355	PH 26005	Innova	534	PH 30905	Innova
177	PH 22890	Innova	356	PH 26006	Innova	535	PH 30906	Innova
178	PH 22895	Innova	357	PH 26007	Innova	536	PH 30907	Innova
179	PH 22978	Innova	358	PH 26008	Innova	537	PH 30947	Innova
						538	PH 30948	Innova

Апарати Artis (програма FA\_2015\_003 (MM021))

№	Серійний номер	Апарат
1	FX009503	ARTIS 230V
2	FX009562	ARTIS 230V
3	FX009583	ARTIS 230V
4	FX009588	ARTIS 230V
5	FX009704	ARTIS 230V
6	FX009706	ARTIS 230V
7	FX009708	ARTIS 230V
8	FX009712	ARTIS 230V
9	FX009715	ARTIS 230V
10	FX009729	ARTIS 230V
11	FX009840	ARTIS 230V
12	FX009844	ARTIS 230V
13	FX009921	ARTIS 230V
14	FX011272	ARTIS 230V
15	FX011964	ARTIS 230V

Апарати Artis (програма FA\_2015\_001 (MM020))

№	Серійний номер	Апарат
1	FX009704	ARTIS 230V
2	FX009706	ARTIS 230V
3	FX009708	ARTIS 230V
4	FX009712	ARTIS 230V
5	FX009715	ARTIS 230V

Із повагою,

В. о. Голови представництва «Бакстер Сі Ай Ес Бі Ві»

