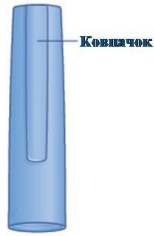
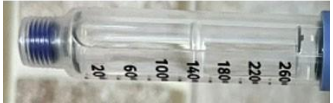


Ознаки фальсифікації шприц-ручки (первинної упаковки) лікарського засобу ОЗЕМПІК

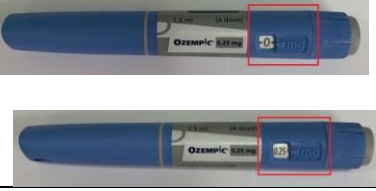
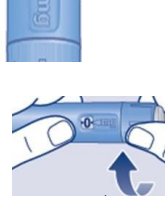
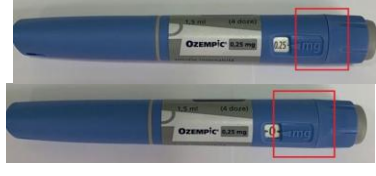
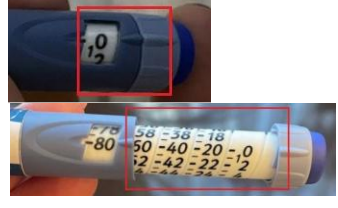
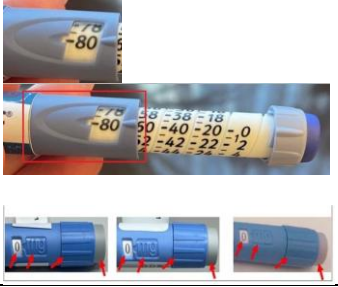


	Опис невідповідності	Оригінальний ЛЗ	Фальсифікований ЛЗ	Оригінальні частини шприц-ручки та голки	Фото оригінального ЛЗ	Фото фальсифікованого ЛЗ
1	Загальне фото шприц-ручки ЛЗ ОЗЕМПІК	---	---	----		
2	Наявність одноразових голок НовоФайн® Плюс в картонній коробці	0,25/0,5 мг: по 1,5 мл 6 одноразових голок НовоФайн® Плюс 1 мг: по 3 мл 4 одноразових голки НовоФайн® Плюс	Відсутні взагалі або може містити недостатню кількість Відсутні взагалі або може містити недостатню кількість	 Зовнішній ковпачок голки Внутрішній ковпачок голки Голка Піанерона мембрана	-----	-----

Ознаки фальсифікації шприц-ручки (первинної упаковки) лікарського засобу ОЗЕМПІК

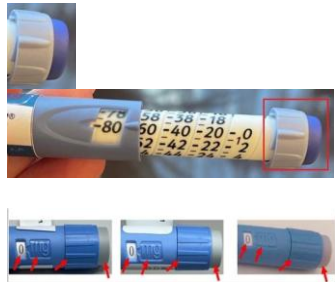
3	Наявність логотипу на ковпачку первинної упаковки (шприц-ручки)	Наявний	Відсутній			
4	Картридж та вікно картриджа (розмір, колір та дизайн)	<u>0,25/0,5 мг: по 1,5 мл</u> Розмір картриджа: 3,3 см Колір картриджа: сірий Колір вікна картриджа: прозорий	Розмір картриджа: Однаковий Колір картриджа: прозорий Колір вікна картриджа: вікно відсутнє			
		<u>1 мг: по 3 мл</u> Розмір картриджа: 5,5 см Колір картриджа: сірий Колір вікна картриджа: прозорий				  

Ознаки фальсифікації шприц-ручки (первинної упаковки) лікарського засобу ОЗЕМПІК

5	Розміщення етикетки до лічильника дози	Близько	Далеко	 Етикетка ручки Лічильник дози		
6	При повертанні селектора дози вперед, щоб обрати дозу, лічильник дози покаже відповідну дозу	0,25/0,5 мг: по 1,5 мл 0мг; 0,25мг/ 0мг; 0,5 мг 1 мг: по 3мл 0мг, 1мг	Від 0 до 80			
7	При повертанні селектора дози вперед, щоб обрати дозу	Шприц-ручка не змінюється в довжині	Шприц-ручка змінюється в довжині (вона постійно зміщується (збільшується))			
8	Наявність покажчика дози	Наявний	Відсутній	 Покажчик дози		

Ознаки фальсифікації шприц-ручки (первинної упаковки) лікарського засобу ОЗЕМПІК



9	Колір пускової кнопки	Сірий	Фіолетовий	 Селектор дози Пускова кнопка		
10	Наявність в лічильнику дози символу перевірки потоку розчину ()	Наявний	Відсутній	 Символ потоку розчину	-----	
11	Порівняння порожнини		Не відповідає справжнім продуктам Novo Nordisk		-----	