

від 27.03.2026 року
Вих. № 259

**Державній службі України з лікарських
засобів та контролю за наркотиками**

03115, м. Київ, просп. Берестейський, 120-А

*Щодо безпечного та ефективного
використання медичних виробів*

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кратія Медтехніка» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38670845, місцезнаходження юридичної особи: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд.17-21, Україна) як Уповноважений представник виробника **Кардіак Пейсмейкерс, Інк., є субсідері оф Бостон Сайнтифік Корпорейшен / Cardiac Pacemakers, Inc., a subsidiary of Boston Scientific Corporation** (місцезнаходження юридичної особи: 4100 Хемлайн Авеню Норз, Сент Пол, Міннесота 55112-5798, США / 4100 Hamline Avenue North, St Paul, Minnesota 55112-5798, USA) на підставі довіреності від 19.03.2025, повідомляє наступне.

Нами, як Уповноваженим представником виробника, отримана інформація від виробника щодо медичних виробів **«Кардіостимулятори сімейства Accolade, кардіостимулятори ресинхронізаційної терапії та програмне забезпечення програматора»**.

Відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», з метою інформування споживачів та безпечного та ефективного використання зазначеного вище медичного виробу, просимо Вас розмістити на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками інформацію щодо коректного використання медичного виробу.

Інформація наведена у Термінових коригувальних заходах щодо медичного виробу – термінове повідомлення щодо безпеки на місцях 97125289Н-ФА.

Додаток:

1. Термінові коригувальні заходи щодо медичного виробу – термінове повідомлення щодо безпеки на місцях 97125289Н-ФА – на 6 арк.

З повагою,

**Заступник Директора з якості
ТОВ «Кратія Медтехніка»**

(посада)



(підпис)

А.О. Сомик

(ініціали та прізвище посадової особи)

УВ Державна служба
України з лікарських
засобів та контролю за
наркотиками
№5381/08-26 від 31.03.2026

арк.1



«Hospital_Name»
«Users_Name»
«Department»
«Customer_Address»
«Zip_Code» «City»
«Country_Name»

<Ідентифікатор: 97125289H-FA>

SRN: US-MF-000010993

Березень 2026 р.

Термінові коригувальні заходи щодо медичного виробу — термінове повідомлення щодо безпеки на місцях Коригування SMR6 Brady для сімейства ACCOLADE™ та розширення групи виробів DR-EL і CRT-P


Шановний лікарю або медичний працівнику!

Ви отримали цей лист для інформування про те, що оновлене програмне забезпечення, а саме допоміжне програмне забезпечення версії 6 (SMR6) Brady, тепер доступне для кардіостимуляторів та кардіостимуляторів для серцевої ресинхронізаційної терапії (CRT-P) сімейства ACCOLADE™¹, а також про розширення групи виробів, стосовно яких випущено рекомендації, яка тепер включає всі вироби CRT-P та двокамерні вироби подовженого терміну служби (DR-EL).



- SMR6 Brady ефективно зменшує раніше повідомлений ризик переходу в безпечний режим в амбулаторних умовах через високий внутрішній опір батареї та виправляє всі небажані поведінкові ефекти, спричинені SMR5 Brady (див. розділ «Клінічний вплив»).
- Однак група виробів, стосовно яких випущено рекомендації, розширюється для включення всіх виробів CRT-P та DR-EL ACCOLADE (див. Додаток А), оскільки існує 7,6% імовірність дострокової заміни виробу через вимкнення беззондової телеметрії ZIP™ (ZIP), індуковане високим внутрішнім опором батареї. Як результат, деякі вироби можуть не досягти початкового, прогнозованого терміну служби.
- Профілактична заміна до підтвердження високого внутрішнього опору батареї не рекомендується.
- Інтервал дистанційного спостереження не змінився, як порівняти з Інструкціями з використання, і більшість виробів, що контролюються особисто, можуть відновити звичайний інтервал спостереження після оновлення до SMR6 (див. Рисунки 1 та 2).
- Існує залишковий ризик увімкнення безпечного режиму в клініці внаслідок використання зондової телеметрії. Цей ризик стосується пацієнтів, за якими не здійснюється моніторинг у системі дистанційного керування пацієнтами LATITUDE™ NXT, які залежать від кардіостимулятора та використовують виріб CRT-P або DR-EL із залишковим терміном служби три роки або менше.

Рекомендації

- Оновіть програматори LATITUDE™ моделі 3300 за допомогою програмного забезпечення моделі 3869 версії 2.05 (SMR6 Brady).
- Оновіть програмне забезпечення кардіостимулятора в клініці, надіславши на виріб відповідний запит за допомогою програматора, оновленого за допомогою SMR6 Brady (модель 3869 версії 2.05).
 - Пацієнти, яким може зашкодити безпечний режим та які ще не отримали SMR5 Brady. Негайно заплануйте особистий візит спостереження, якщо залишковий термін служби становить чотири (4) роки або менше. Зверніть увагу, що на нижньому колонтитулі звіту про подальше спостереження за виробом указано версію мікропрограми виробу. Якщо в дужках після версії мікропрограми зазначено «(3.10)» або більше значення, виріб було оновлено до SMR5 або SMR6 Brady.¹
 - Усі інші пацієнти. Заплануйте наступні особисті візити спостереження із частотою, описаною в Інструкціях із використання: кожні 12 місяців або кожні 3 місяці, якщо стан батареї досягне «Залишився один рік».
- Слідкуйте за виробами, використовуючи відповідну блок-схему нижче, залежно від стану дистанційного моніторингу (Рисунки 1 та 2).
- Оновіть медичну картку кожного пацієнта з проблемним виробом (див. Додаток А), додавши цей лист, щоб забезпечити постійну обізнаність протягом залишкового терміну служби виробу.

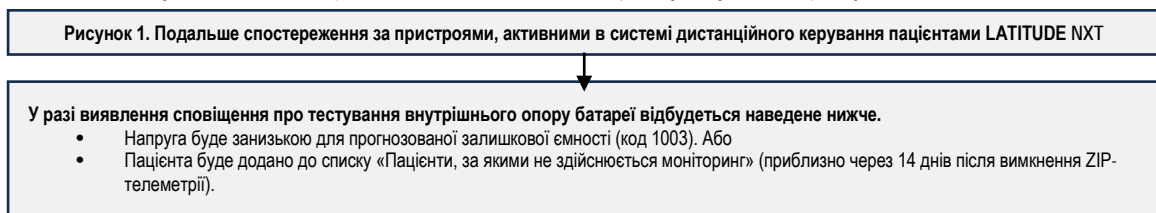

Зверніться до служби технічної підтримки для отримання клінічних рекомендацій

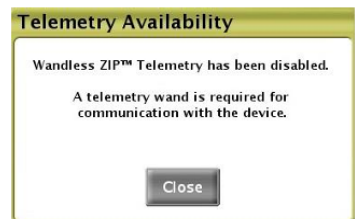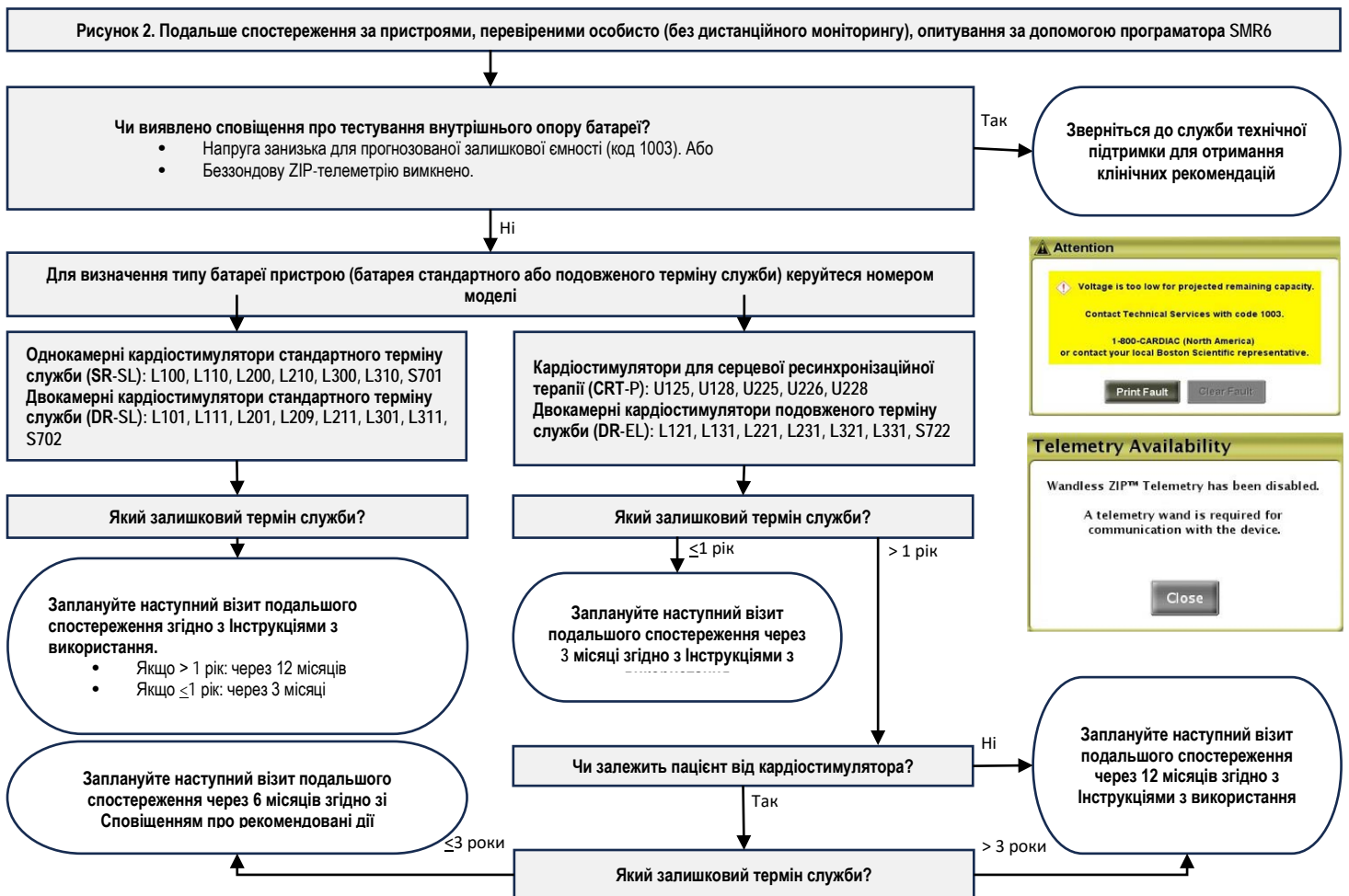

¹SMR6 Brady моделі 3869 версії 2.05 містить мікропрограму версії «(3.24)», а SMR5 Brady моделі 3869 версії 2.04 містить мікропрограму версії «(3.10)»

Клінічний вплив

SMR6 Brady вирішує раніше описану проблему неповного вимкнення ZIP-телеметрії та хибнопозитивних результатів тестування внутрішнього опору батареї, індукованих магнітом¹. Для пацієнтів, за якими здійснюється дистанційний моніторинг, якщо ZIP-телеметрія вимикається через високий внутрішній опір батареї, виріб через 14 днів відобразить на сторінці LATITUDE NXT повідомлення «За пацієнтом не здійснюється моніторинг», а не генеруватиме сповіщення «Дистанційний моніторинг вимкнено».

Вплив на термін служби виробу

Будь-який виріб ACCOLADE, у якому тестування внутрішнього опору батареї призводить до вимкнення ZIP-телеметрії через виявлення високого внутрішнього опору батареї, потребує заміни до рекомендованої дати звичайної заміни батареї. Існує 7,6% імовірність того, що окремий виріб CRT-P або DR-EL потребуватиме передчасної заміни через вимкнення ZIP-телеметрії, індуковане високим внутрішнім опором батареї. Для цих виробів прогнозоване скорочення терміну служби становить $10,9\% \pm 9,6\%^2$. Очікується, що 92,4% виробів CRT-P та DR-EL досягнуть очікуваного терміну служби. Таким чином, загальний зважений вплив високого внутрішнього опору батареї на термін служби становить 1%.³

Зважаючи на цей вплив на термін служби, компанія Boston Scientific розширює групу виробів, стосовно яких випущено рекомендації, включаючи до неї всі вироби CRT-P та DR-EL (див. Додаток А) до моменту отримання додаткових уточнених результатів тестування внутрішнього опору батареї та оновлених прогнозів щодо терміну служби. Однокамерні (SR) та двокамерні (DR) вироби стандартного терміну служби (SL) працюють у межах очікуваного терміну служби; тому розширення групи цих виробів не потрібне.

Компанія Boston Scientific розробляє оновлення програмного забезпечення й відповідну редакцію Інструкцій із використання для покращення продуктивності тестування внутрішнього опору батареї та усунення впливу на термін служби.

Заповніть Лист-ознайомлення, що додається, і надішліть його в компанію Boston Scientific за номером факсу «Customer Service Fax Number» до 10 квітня 2026 року. Кожен заклад, який отримав цей лист, має повернути заповнену форму.

Додаткова інформація

Регуляторний орган Вашої країни було повідомлено про цей лист. Про побічні реакції слід повідомляти в компанію Boston Scientific і регуляторні органи, якщо це доречно.

Лист для пацієнта, який можна поширити пацієнтам, надається за запитом.

Безпека пацієнтів залишається головним пріоритетом компанії Boston Scientific. Ми серйозно ставимося до обов'язку спілкування з лікарями й медичними працівниками, щоб Ви володіли своєчасною та актуальною інформацією для лікування своїх пацієнтів. Інформація за цією темою, інструмент для огляду виробу та інструкції щодо повернення експлантованих продуктів доступні в нашому центрі даних щодо характеристик продуктів за адресою www.bostonscientific.com/ppr. Якщо у Вас виникли додаткові запитання або Вам потрібно повідомити про клінічний випадок, зверніться до представника компанії Boston Scientific або служби технічної підтримки.

З повагою,



Александра Нотон (Alexandra Naughton)
Віцепрезидент із забезпечення якості

Вкладення: лист-ознайомлення

Додаток А

¹Компанія Boston Scientific зв'язується з клініками пацієнтів, у яких спостерігалось хибнопозитивне вимкнення ZIP-телеметрії, індуковане магнітом, та за бажанням допоможе відновити дистанційний моніторинг

²Середнє значення \pm стандартне відхилення

³На основі аналізу LATITUDE понад 123 000 виробів сімейства ACCOLADE у США, оновлених до SMR5, протягом періоду до 3 місяців

Група виробів, стосовно яких випущено рекомендації, включає всі перераховані нижче моделі; однак перелік відрізняється залежно від типу батареї.

- До групи виробів, стосовно яких випущено рекомендації, включено всі серіалізовані кардіостимулятори DR-EL та CRT-P із сімейства ACCOLADE.
- До групи виробів, стосовно яких випущено рекомендації, включено вироби DR-SL та SR-SL ACCOLADE із терміном придатності до 30 червня 2025 року. Сам номер моделі не дасть змогу точно ідентифікувати окремі вироби DR-SL або SR-SL у групі виробів, стосовно яких випущено рекомендації.

Щоб визначити, чи стосується проблема конкретного виробу, введіть модель / серійний номер в інструменті пошуку виробів на сторінці www.BostonScientific.com/lookup.

GTIN	Model	Product Name	GTIN	Model	Product Name	GTIN	Model	Product Name
00802526558900	L100	ESSENTIO SR-SL	00802526576874	L201	PROPONENT DR-SL	00802526572371	L310	ACCOLADE MRI SR-SL
00802526558917	L100	ESSENTIO SR-SL	00802526578014	L201	PROPONENT DR-SL	00802526572388	L310	ACCOLADE MRI SR-SL
00802526571923	L100	ESSENTIO SR-SL	00802526593246	L201	PROPONENT DR-SL	00802526576454	L310	ACCOLADE MRI SR-SL
00802526571930	L100	ESSENTIO SR-SL	00802526611834	L201	PROPONENT DR-SL	00802526576959	L310	ACCOLADE MRI SR-SL
00802526571947	L100	ESSENTIO SR-SL	00802526559068	L209	PROPONENT VDDR-SL	00802526578069	L310	ACCOLADE MRI SR-SL
00802526576300	L100	ESSENTIO SR-SL	00802526572166	L209	PROPONENT VDDR-SL	00802526609015	L310	ACCOLADE MRI SR-SL
00802526576805	L100	ESSENTIO SR-SL	00802526576386	L209	PROPONENT VDDR-SL	00802526611803	L310	ACCOLADE MRI SR-SL
00802526593109	L100	ESSENTIO SR-SL	00802526576881	L209	PROPONENT VDDR-SL	00802526559228	L311	ACCOLADE MRI DR-SL
00802526611605	L100	ESSENTIO SR-SL	00802526611889	L209	PROPONENT VDDR-SL	00802526559235	L311	ACCOLADE MRI DR-SL
00802526558924	L101	ESSENTIO DR-SL	00802526559075	L210	PROPONENT MRI SR-SL	00802526572395	L311	ACCOLADE MRI DR-SL
00802526558931	L101	ESSENTIO DR-SL	00802526559082	L210	PROPONENT MRI SR-SL	00802526572401	L311	ACCOLADE MRI DR-SL
00802526571954	L101	ESSENTIO DR-SL	00802526572180	L210	PROPONENT MRI SR-SL	00802526572418	L311	ACCOLADE MRI DR-SL
00802526571961	L101	ESSENTIO DR-SL	00802526576393	L210	PROPONENT MRI SR-SL	00802526576461	L311	ACCOLADE MRI DR-SL
00802526571978	L101	ESSENTIO DR-SL	00802526576898	L210	PROPONENT MRI SR-SL	00802526576966	L311	ACCOLADE MRI DR-SL
00802526576317	L101	ESSENTIO DR-SL	00802526578021	L210	PROPONENT MRI SR-SL	00802526578076	L311	ACCOLADE MRI DR-SL
00802526576812	L101	ESSENTIO DR-SL	00802526609077	L210	PROPONENT MRI SR-SL	00802526609008	L311	ACCOLADE MRI DR-SL
00802526593116	L101	ESSENTIO DR-SL	00802526611773	L210	PROPONENT MRI SR-SL	00802526611896	L311	ACCOLADE MRI DR-SL
00802526611629	L101	ESSENTIO DR-SL	00802526559099	L211	PROPONENT MRI DR-SL	00802526559242	L321	ACCOLADE DR-EL
00802526558948	L110	ESSENTIO MRI SR-SL	00802526559105	L211	PROPONENT MRI DR-SL	00802526559259	L321	ACCOLADE DR-EL
00802526558955	L110	ESSENTIO MRI SR-SL	00802526572210	L211	PROPONENT MRI DR-SL	00802526572425	L321	ACCOLADE DR-EL
00802526571985	L110	ESSENTIO MRI SR-SL	00802526576409	L211	PROPONENT MRI DR-SL	00802526572432	L321	ACCOLADE DR-EL
00802526572005	L110	ESSENTIO MRI SR-SL	00802526576904	L211	PROPONENT MRI DR-SL	00802526576478	L321	ACCOLADE DR-EL
00802526576324	L110	ESSENTIO MRI SR-SL	00802526578038	L211	PROPONENT MRI DR-SL	00802526576973	L321	ACCOLADE DR-EL
00802526576829	L110	ESSENTIO MRI SR-SL	00802526609022	L211	PROPONENT MRI DR-SL	00802526593260	L321	ACCOLADE DR-EL
00802526609039	L110	ESSENTIO MRI SR-SL	00802526611704	L211	PROPONENT MRI DR-SL	00802526611766	L321	ACCOLADE DR-EL
00802526611636	L110	ESSENTIO MRI SR-SL	00802526559112	L221	PROPONENT DR-EL	00802526619403	L321	ACCOLADE DR-EL
00802526558962	L111	ESSENTIO MRI DR-SL	00802526559129	L221	PROPONENT DR-EL	00802526559266	L331	ACCOLADE MRI DR-EL
00802526558979	L111	ESSENTIO MRI DR-SL	00802526572241	L221	PROPONENT DR-EL	00802526559273	L331	ACCOLADE MRI DR-EL
00802526572012	L111	ESSENTIO MRI DR-SL	00802526572265	L221	PROPONENT DR-EL	00802526572456	L331	ACCOLADE MRI DR-EL
00802526572029	L111	ESSENTIO MRI DR-SL	00802526576416	L221	PROPONENT DR-EL	00802526572463	L331	ACCOLADE MRI DR-EL
00802526572036	L111	ESSENTIO MRI DR-SL	00802526576911	L221	PROPONENT DR-EL	00802526572470	L331	ACCOLADE MRI DR-EL
00802526576331	L111	ESSENTIO MRI DR-SL	00802526578045	L221	PROPONENT DR-EL	00802526576485	L331	ACCOLADE MRI DR-EL
00802526576836	L111	ESSENTIO MRI DR-SL	00802526593307	L221	PROPONENT DR-EL	00802526576980	L331	ACCOLADE MRI DR-EL
00802526609060	L111	ESSENTIO MRI DR-SL	00802526571858	L221	PROPONENT DR-EL	00802526578083	L331	ACCOLADE MRI DR-EL
00802526611612	L111	ESSENTIO MRI DR-SL	00802526559136	L231	PROPONENT MRI DR-EL	00802526592201	L331	ACCOLADE MRI DR-EL
00802526558986	L121	ESSENTIO DR-EL	00802526559143	L231	PROPONENT MRI DR-EL	00802526609084	L331	ACCOLADE MRI DR-EL
00802526558993	L121	ESSENTIO DR-EL	00802526572272	L231	PROPONENT MRI DR-EL	00802526611872	L331	ACCOLADE MRI DR-EL
00802526572043	L121	ESSENTIO DR-EL	00802526576423	L231	PROPONENT MRI DR-EL	00802526559327	S701	ALTRUA 2 SR-SL
00802526576348	L121	ESSENTIO DR-EL	00802526576928	L231	PROPONENT MRI DR-EL	00802526559334	S701	ALTRUA 2 SR-SL
00802526576843	L121	ESSENTIO DR-EL	00802526578052	L231	PROPONENT MRI DR-EL	00802526572487	S701	ALTRUA 2 SR-SL
00802526593277	L121	ESSENTIO DR-EL	00802526609046	L231	PROPONENT MRI DR-EL	00802526576492	S701	ALTRUA 2 SR-SL
00802526611650	L121	ESSENTIO DR-EL	00802526611780	L231	PROPONENT MRI DR-EL	00802526576997	S701	ALTRUA 2 SR-SL
00802526559006	L131	ESSENTIO MRI DR-EL	00802526616600	L231	PROPONENT MRI DR-EL	00802526578090	S701	ALTRUA 2 SR-SL
00802526559013	L131	ESSENTIO MRI DR-EL	00802526559150	L300	ACCOLADE SR-SL	00802526593222	S701	ALTRUA 2 SR-SL
00802526572074	L131	ESSENTIO MRI DR-EL	00802526559167	L300	ACCOLADE SR-SL	00802526611841	S701	ALTRUA 2 SR-SL
00802526572081	L131	ESSENTIO MRI DR-EL	00802526572302	L300	ACCOLADE SR-SL	00802526559341	S702	ALTRUA 2 DR-SL
00802526576355	L131	ESSENTIO MRI DR-EL	00802526576430	L300	ACCOLADE SR-SL	00802526559358	S702	ALTRUA 2 DR-SL
00802526576850	L131	ESSENTIO MRI DR-EL	00802526576935	L300	ACCOLADE SR-SL	00802526572517	S702	ALTRUA 2 DR-SL
00802526609053	L131	ESSENTIO MRI DR-EL	00802526593321	L300	ACCOLADE SR-SL	00802526576508	S702	ALTRUA 2 DR-SL
00802526611643	L131	ESSENTIO MRI DR-EL	00802526611810	L300	ACCOLADE SR-SL	00802526577000	S702	ALTRUA 2 DR-SL
00802526559020	L200	PROPONENT SR-SL	00802526559174	L301	ACCOLADE DR-SL	00802526578106	S702	ALTRUA 2 DR-SL
00802526559037	L200	PROPONENT SR-SL	00802526559181	L301	ACCOLADE DR-SL	00802526593208	S702	ALTRUA 2 DR-SL
00802526572104	L200	PROPONENT SR-SL	00802526572333	L301	ACCOLADE DR-SL	00802526611759	S702	ALTRUA 2 DR-SL
00802526576362	L200	PROPONENT SR-SL	00802526572340	L301	ACCOLADE DR-SL	00802526559365	S722	ALTRUA 2 DR-EL
00802526576867	L200	PROPONENT SR-SL	00802526572357	L301	ACCOLADE DR-SL	00802526559372	S722	ALTRUA 2 DR-EL
00802526578007	L200	PROPONENT SR-SL	00802526576447	L301	ACCOLADE DR-SL	00802526573071	S722	ALTRUA 2 DR-EL
00802526593338	L200	PROPONENT SR-SL	00802526576942	L301	ACCOLADE DR-SL	00802526576515	S722	ALTRUA 2 DR-EL
00802526611827	L200	PROPONENT SR-SL	00802526593215	L301	ACCOLADE DR-SL	00802526577017	S722	ALTRUA 2 DR-EL
00802526559044	L201	PROPONENT DR-SL	00802526611865	L301	ACCOLADE DR-SL	00802526578113	S722	ALTRUA 2 DR-EL
00802526559051	L201	PROPONENT DR-SL	00802526559204	L310	ACCOLADE MRI SR-SL	00802526593239	S722	ALTRUA 2 DR-EL
00802526572135	L201	PROPONENT DR-SL	00802526559211	L310	ACCOLADE MRI SR-SL	00802526611711	S722	ALTRUA 2 DR-EL
00802526576379	L201	PROPONENT DR-SL	00802526572364	L310	ACCOLADE MRI SR-SL	00802526559389	U125	VALITUDE CRT-P IS-1

GTIN	Model	Product Name	GTIN	Model	Product Name	GTIN	Model	Product Name
00802526559396	U125	VALITUDE CRT-P IS-1	00802526578120	U128	VALITUDE X4 CRT-P	00802526572678	U226	VISIONIST CRT-P
00802526573101	U125	VALITUDE CRT-P IS-1	00802526593284	U128	VALITUDE X4 CRT-P	00802526577062	U226	VISIONIST CRT-P
00802526573118	U125	VALITUDE CRT-P IS-1	00802526611797	U128	VALITUDE X4 CRT-P	00802526577123	U226	VISIONIST CRT-P
00802526573125	U125	VALITUDE CRT-P IS-1	00802526559426	U225	VISIONIST CRT-P	00802526578816	U226	VISIONIST CRT-P
00802526577024	U125	VALITUDE CRT-P IS-1	00802526559433	U225	VISIONIST CRT-P	00802526611728	U226	VISIONIST CRT-P
00802526577109	U125	VALITUDE CRT-P IS-1	00802526572630	U225	VISIONIST CRT-P	00802526559471	U228	VISIONIST X4 CRT-P
00802526578793	U125	VALITUDE CRT-P IS-1	00802526572647	U225	VISIONIST CRT-P	00802526559488	U228	VISIONIST X4 CRT-P
00802526593291	U125	VALITUDE CRT-P IS-1	00802526577048	U225	VISIONIST CRT-P	00802526572692	U228	VISIONIST X4 CRT-P
00802526611735	U125	VALITUDE CRT-P IS-1	00802526577116	U225	VISIONIST CRT-P	00802526572708	U228	VISIONIST X4 CRT-P
00802526559402	U128	VALITUDE X4 CRT-P	00802526578809	U225	VISIONIST CRT-P	00802526572715	U228	VISIONIST X4 CRT-P
00802526559419	U128	VALITUDE X4 CRT-P	00802526593253	U225	VISIONIST CRT-P	00802526577055	U228	VISIONIST X4 CRT-P
00802526572609	U128	VALITUDE X4 CRT-P	00802526611742	U225	VISIONIST CRT-P	00802526577130	U228	VISIONIST X4 CRT-P
00802526572616	U128	VALITUDE X4 CRT-P	00802526559457	U226	VISIONIST CRT-P	00802526578830	U228	VISIONIST X4 CRT-P
00802526572623	U128	VALITUDE X4 CRT-P	00802526559464	U226	VISIONIST CRT-P	00802526593314	U228	VISIONIST X4 CRT-P
00802526576522	U128	VALITUDE X4 CRT-P	00802526572661	U226	VISIONIST CRT-P	00802526611902	U228	VISIONIST X4 CRT-P
00802526577031	U128	VALITUDE X4 CRT-P						

Заповніть цю форму й надішліть її факсом:
«Customer_Service_Fax_Number»

«Sold_to» - «Hospital_Name» - «City» - «Country_Name»

**Лист-ознайомлення — термінове сповіщення щодо проблеми безпеки
Коригування SMR6 Brady для сімейства ACCOLADE™ та розширення
групи виробів DR-EL і CRT-P**

97125289H-FA

Підписуючи цю форму, я підтверджую, що

**я прочитав(-ла) і зрозумів(-ла)
сповіщення щодо проблеми безпеки від компанії Boston Scientific від
березня 2026 року щодо:**

**Коригування SMR6 Brady для сімейства ACCOLADE™ та розширення
групи виробів DR-EL і CRT-P**

ПІБ* _____ Посада _____

Телефон _____ Адреса електронної пошти _____

Підпис* _____ ДАТА* _____

* Обов'язкове поле

дд/мм/рррр